



SAM[®] Pelvic Sling II

SAM[®]
MEDICAL


STABILIZUJE ZLOMENINY PÁNVE BEZPEČNOU A ÚČINNOU SILOU

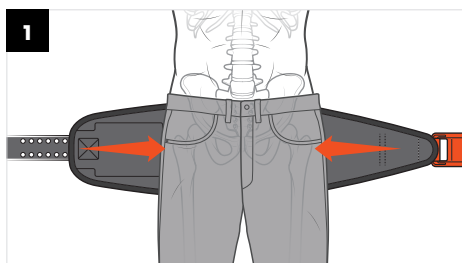

Odstraňte předměty z pacientových kapes a pánevní oblasti. Umístěte pánevní pás SAM Pelvic Sling II černou stranou nahoru pod pacienta na úrovni trochanterů (kyčle).

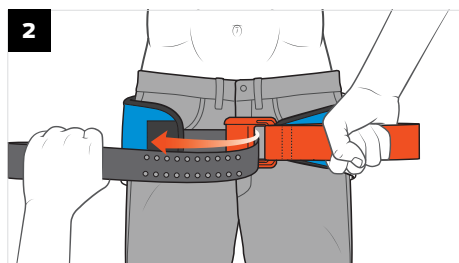

Provléknete celou délku **ČERNÉHO POPRUHU** přezkou.

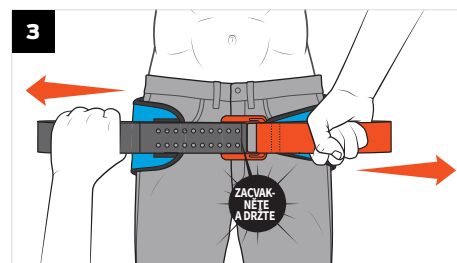

Držte **ORANŽOVÝ POPRUH** (**ZELENÝ POPRUH** u PS301-OD-EN) a táhněte opačným směrem za **ČERNÝ POPRUH**, dokud neuslyšíte a nepocítíte zacvaknutí přezky. Udržujte napnutí a ČERNÝ POPRUH ihned zajistěte přitlačením na povrch pánevního pásu SAM Pelvic Sling II.

POZNÁMKA: Pokud po zajištění pánevního pásu SAM Pelvic Sling II uslyšíte druhé cvaknutí, neznamená to problém. Suchý zip (Velcro[®]) zajišťuje pás na místě při aplikaci správné síly bez ohledu na zapojení přezky.

ODSTRANĚNÍ: Zvedněte **ČERNÝ POPRUH** tažením směrem nahoru. Udržujte ho napnutý a nechte pás SAM Pelvic Sling II pomalu uvolnit.

URČENÉ POUŽITÍ: SAM Pelvic Sling II je neinvazivní, obvodový pánevní pás určený ke stabilizaci zlomenin pánve pro převoz do zařízení poskytujícího definitivní péči.

INDIKACE PRO POUŽITÍ: Pánevní pás SAM Pelvic Sling II je indikován k použití poskytovateli přednemocniční péče, zdravotníky nebo školenými osobami u osob se zlomeninou pánevního kruhu nebo s podezřením na ni, s možným krvácením.

KONTRAINDIKACE: Pánevní pás SAM Pelvic Sling nepoužívejte, pokud chybějí anatomické orientační body.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Před nasazením odstraňte předměty z pacientových kapes a oděvu.
- Během používání sledujte, zda kůže pacienta nevykazuje otlačení.
- Prostředek je pro jedno použití.
- Opakované použití prostředku může způsobit onemocnění (např. infekci) nebo poranění (zhoršená funkce).
- Použitý prostředek zlikvidujte podle předpisů zdravotnického zařízení pro biologicky nebezpečný odpad.

Poznámka pro uživatele/pacienty v EU: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s tímto prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

REF	PS300-OB-EN		MALÝ Obvod boků	69–114 cm 27–45 palců
REF	PS301-OB-EN		STANDARDNÍ Obvod boků	81–127 cm 32–50 palců
REF	PS302-OB-EN		VELKÝ Obvod boků	91–137 cm 36–54 palců
REF	PS301-OD-EN		STANDARDNÍ Obvod boků	81–127 cm 32–50 palců

(NSN: 6515-01-509-6866)

SAM Medical Products[®]
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062, USA

EC REP **CE**
Emergo Europe, Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, Nizozemsko

MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,
2595 AM Haag, Nizozemsko

⚠ **MR** **PODMÍNĚNĚ BEZPEČNÝ PRO MR**

Neklinické zkoušky prokázaly, že pánevní pás SAM Pelvic Sling II je podmíněně bezpečný pro MR. Pacient, který má nasazený tento prostředek, může být MR systémem bezpečně snímkován při splnění těchto podmínek:

- Statické magnetické pole 3 T nebo méně.

Důležitá poznámka: SAM Pelvic Sling II obsahuje feromagnetické součásti a proto musí být pevně připevněn na těle pacienta podstupujícího MR vyšetření. Pokud jsou feromagnetické součásti při MR vyšetření v zobrazované oblasti, mohou zhoršit kvalitu obrazu. SAM Pelvic Sling II se nesmí v přítomnosti silného magnetického pole, jako je pole vytvářené MR systémem, přemísťovat ani sundávat z těla pacienta.

KLINICKÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Podmínkou bezpečného použití tohoto výrobku je seznámit se s pánevním pásem SAM Pelvic Sling II a návodem k jeho použití, absolvovat školení a dodržovat na důkazech založený standard péče zdravotnické organizace a klinická doporučení včetně používání osobních ochranných prostředků. Pokud tento prostředek není používán v souladu s návodem k použití, školením a klinickými doporučeními postupy, může to mít za následek vážné onemocnění nebo poranění.

LEGENDA ZNAČEK:

Výrobce		Nepoužívat opětně	
Kód dávky	LOT	Označení CE	CE
Podmíněně bezpečný pro MR		Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství	EC REP
Pozor		Čtěte návod k použití. Elektronický návod k použití: sammedical.com/eIFU	
Katalogové číslo	REF	Dovozce	
Zdravotnický prostředek	MD	Jedinečný identifikátor prostředku	UDI
Malý, standardní, velký			

©2023 SAM Medical Products[®] Všechna práva vyhrazena.