

STEROWASH-sterilní výplach očí a ran

Sterilní neutrální roztok chloridu sodného 0,9%

Dokonale vyvážený, aby odpovídal přirozenému pH těla

Slouží pro oplach a čištění traumatických ran, popálenin a výplach očí, které byly kontaminovány částicemi nebo tekutinou.



Návod k použití

Otevření

Odlomte vrch ampuli.

Po otevření se nedotýkejte trysky.



Pro výplach ran

Namiřte trysku na ránu a zmáčkněte ampulku.

Není třeba používat injekční stříkačky.

Po použití přebytek zlikvidujte.



Pro výplach očí

Namiřte trysku na oko a jemně zmáčkněte ampulku.

Po použití přebytek zlikvidujte.



NENÍ URČENO K INJEKČNÍ APLIKACI

- Vhodné pro použití u dospělých a dětí.
- Nepoužívejte v případě zakalení obsahu nebo porušení obalu.
- Skladujte při teplotě 5 až 25 C °.
- Přebytečný roztok zlikvidujte.
- Roztok znovu nepoužívejte, protože by to mohlo vést k infekci v důsledku mikrobiální kontaminace.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při práci s chemickou kontaminací se řiďte bezpečnostními listy COSHH.
- Není určeno k injekčnímu podání.
- Značení na ampulce slouží pouze k orientačnímu označení.




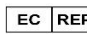
uchovejte v chladu a suchu
nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Pouze pro jedno použití

CE MD

1639

 Steroplast Healthcare Ltd,
Alpha Point, Bradnor Road
Manchester, M22 4TE
Spojené Království

 Advena Ltd,
Tower Business Centre,
Swatar,
BKR 4013 Malta

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.,
Miranova 148/10,
102 00 Praha 10 – Hostivař,
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: květen 2023