



1. ZÁKLADNÍ TVAROVÁNÍ: OHÝBÁNÍM ZPEVNĚTE

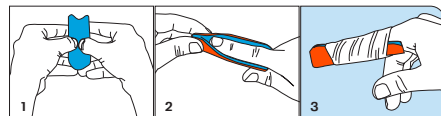


2. PRST




3. PALEČ

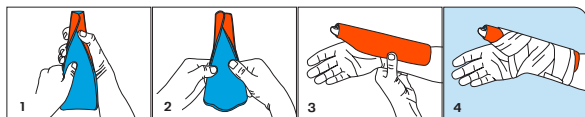


4. RUKA

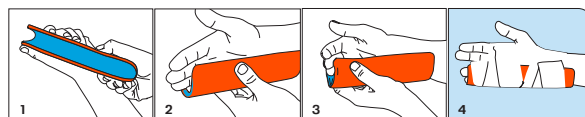


5. ZÁPĚSTÍ

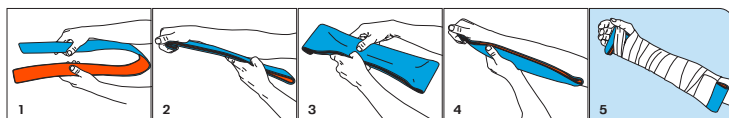


6. NADLOKTÍ

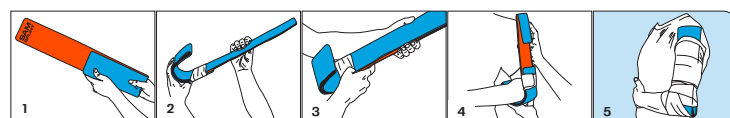


7. ZÁPĚSTÍ

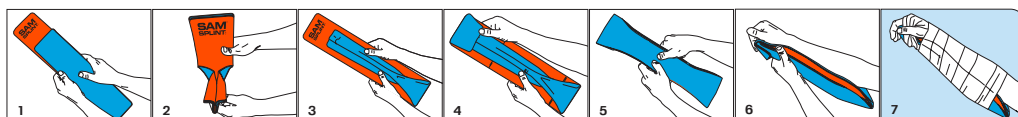


8. ZÁPĚSTÍ

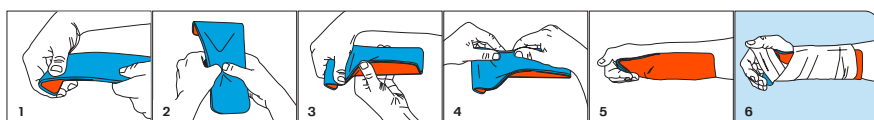


9. ZÁPĚSTÍ/PŘEDLOKTÍ

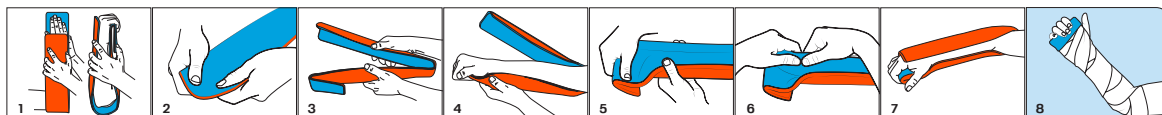


10. LOKET

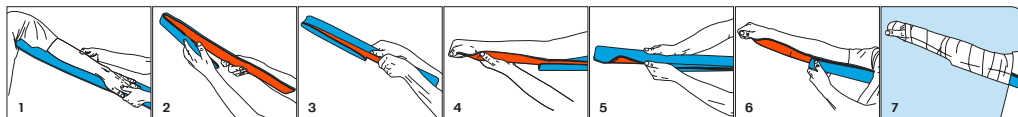


11. HORNÍ ČÁST NOHY

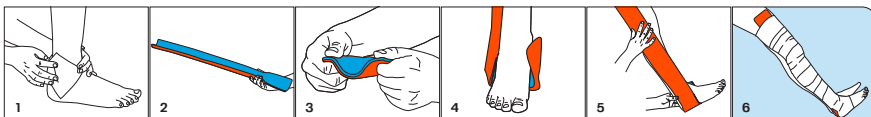


12. KOTNÍK

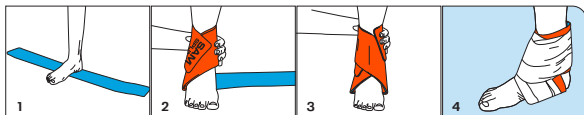


13. KOTNÍK

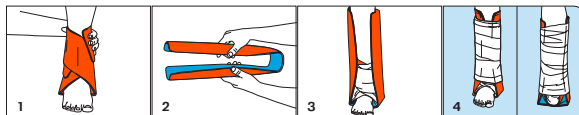


14. KOLENO

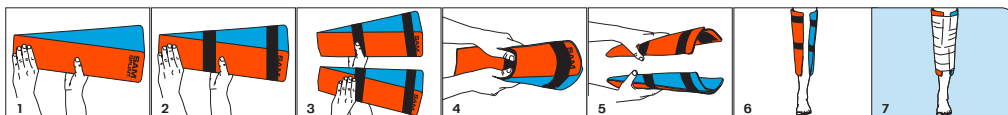

15. DOLNÍ ČÁST NOHY

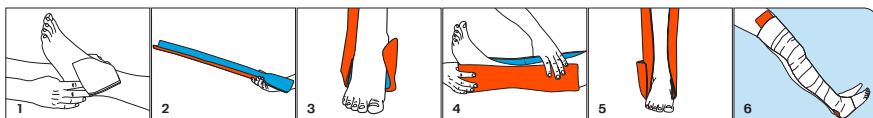

16. KOTNÍK

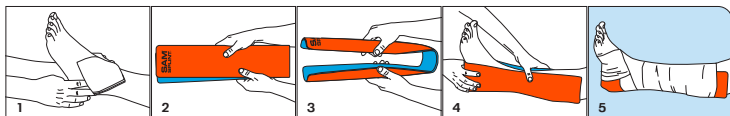

PÉČE A ÚDRŽBA

Dlahy SAM[®] Splint je opakovaně použitelná tvarovatelná dlahy, kterou lze řádně vyčistit a dezinfikovat k dalšímu použití v terénu. Tato doporučení slouží k maximalizaci životnosti dlahy SAM[®] Splint. Pacienti musí dodržovat specifické postupy čištění a dezinfekce doporučené jejich lékařem.

POSTUP ČIŠTĚNÍ

Pokud se rozhodnete dlahu SAM[®] Splint použít opakovaně, je třeba nejprve očistit hrubé znečištění hadříkem nebo houbou namočenou do mýdlové vody nebo slabého detergentu. Před dezinfekcí je třeba zcela odstranit krev, tělesné tekutiny, tkáně nebo jiná znečištění.

Dále připravte rozředěný roztok bělicího prostředku na bázi chloranu sodného (např. Clorox nebo White King) s konečnou koncentrací 0,625 % až 0,7 %. Obvykle jí lze dosáhnout rozředěním jednoho dílu bělicího prostředku v 9 dílech vody u běžného domácího bělicího prostředku nebo jednoho dílu bělicího prostředku v 11 dílech vody u koncentrovaného bělicího prostředku.

Plně dlahu SAM[®] Splint ponořte do rozředěného roztoku bělicího prostředku a otíráním všech povrchů ponořené dlahy (včetně bočních) čistým hadříkem zajistěte, že se odstraní všechny vzduchové bubliny. Po otření nechte dlahu SAM[®] Splint dalších 10 minut ponořenou v roztoku bělicího prostředku.

Po odmočení dlahu SAM[®] Splint VŽDY důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a před dalším používáním ji nechte oschnout nebo osušte utěrkou.

LIKVIDACE

Před likvidací vyčistěte a dezinfikujte.

URČENÉ POUŽITÍ

Dlahy SAM Splint je určená k dočasnému znehybnění končetin po traumatickém poranění.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Dlahy SAM Splint je nesterilní, opakovaně použitelný prostředek indikovaný pro použití při krátkodobé přednemocniční péči k ošetření akutních traumatických stavů, např. vymknutí, natažení, kontuzí a zlomenin, a k prevenci dalšího poškození při převozu do zařízení poskytujícího definitivní péči.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pokud dlahu seříznete na potřebnou velikost, zakryjte odříznutou hranu páskou nebo ji přehněte
- Po použití prostředek zkontrolujte a vyhodte, pokud je obnažena hliníková komponenta

MR PODMÍNĚNĚ BEZPEČNÝ PRO MR

Dlahy SAM Splint je podmíněně bezpečná pro MR a tato informace platí pro celou výrobní řadu dlah SAM Splint. Byly provedeny neklinické zkoušky a simulace MR k identifikaci nejhorších podmínek, které posloužily k prokázání podmíněně bezpečnosti dlahy SAM Splint pro MR. Pacient s tímto prostředkem může být ihned po implantaci bezpečně snímán při splnění těchto podmínek:

- Statické magnetické pole pouze 1,5 T nebo 3 T
- Maximální prostorový gradient magnetického pole 10 000 G/cm (extrapolovaný) nebo méně
- Maximální MR systémem hlášený měrný absorbovaný výkon přepočtený na celé tělo o hodnotě 4 W/kg za 15 minut snímání (tj. za pulzní sekvenci) v řízeném provozním režimu první úrovně

Za takto definovaných podmínek snímání se očekává, že u dlahy SAM Splint dojde k maximálnímu zvýšení teploty o 2,5 °C za 15 minut nepřetržitého snímání (tj. za pulzní sekvenci).

V neklinických zkouškách zasahoval artefakt obrazu způsobený dlahou SAM Splint přibližně 10 mm od tohoto prostředku zobrazeného při použití pulzní sekvence gradient echo a systému MR o síle 3 T.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE/PACIENTY:

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s tímto prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

LEGENDA ZNAČEK:

Výrobce		Podmíněně bezpečný pro MR	
Kód dávky	LOT	Pozor	
Neobsahuje latex přírodního kaučuku		Označení CE	CE
Katalogové číslo	REF	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství	EC REP
Zdravotnický prostředek	MD	Dovoze	
Radiolucentní (RTG průsvitný)	X-RAY	Čtěte návod k použití. Elektronický návod k použití: sammedical.com/elFU	
Jedinečný identifikátor prostředku	UDI		