

Dospělá figurína RESCUE RANDY

**PP01338, 1335, 1344, 1345, 1434,
1435, 1475**

Návod k obsluze



Cílem tohoto návodu k obsluze je seznámit uživatele s funkcí, péčí a údržbou modelu RESCUE RANDY. Figurína je vytvořena tak, aby vyhovovala přesným kritériím a poskytovala bezproblémové použití při dodržování několika pravidel a jednoduchých kroků pro péči a údržbu.

VLASTNOSTI

Figurína Randy věrně napodobuje svou hmotností, velikostí a materiálem, ze kterého je vyrobena, skutečného člověka. Model má pohyblivé klouby, takže se může použít při různých výukách záchrany lidského života včetně vyprošťování z místa nehody, použití protišokových kalhot a při dalších záchranářských postupech při evakuaci.

POZNÁMKA: ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE HÁK S OKEM NA ZADNÍ STRANĚ FIGURÍNY K ZAVĚŠENÍ. Jestliže výuka vyžaduje zavěšení figuríny, nasadte Randymu výstroj určenou pro tyto specifické procedury.

K výuce záchrany při utonutí, použijte **VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ FIGURÍNY.**

KONSTRUKCE

Uvnitř figuríny se nachází ocelová kostra a pružné lanko. Při delším používání může dojít k rozšíření některých částí těla (kloubů), otvorů pro kabelové přípojky nebo otvorů mezi tělovými klouby, tato skutečnost nemá vliv na její použitelnost.

PÉČE A ÚDRŽBA

Přestože figurína Randy nahrazuje živého pacienta, pečlivě se o ni starejte. Doporučujeme nevystavovat ji teplotám vyšším než 38°C (s výjimkou krátkého časového úseku) a chránit před nárazy. Tím předejdete deformaci těla a případnému poškození vnitřní konstrukce. Dávejte také pozor, aby nedošlo k propíchnutí nebo natržení kůže na těle nebo končetinách. Otáčejte končetinami jen do poloh, které jsou pro člověka přirozené.

UPOZORNĚNÍ: NESVAZUJTE KONČETINY NEBO KLOUBY FIGURÍNY K SOBĚ ANI JEDNOTLIVĚ ZA ÚČELEM LEPŠÍHO OVLÁDÁNÍ PŘI PŘESUNU NEBO VLEČENÍ.


Po každém použití nebo v případě potřeby omyjte figurínu teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

Figurínu lze používat i při nízkých teplotách, ale musíte počítat s tím, že její vinylové tělo ztuhne. Jakmile se teplota v okolí zvýší, figurína bude opět normálně ohebná.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte figurínu při běžné pokojové teplotě 16 – 27° C v přenosném úložném vaku.

SCHÉMA MONTÁŽE DOLNÍ KONČETINY

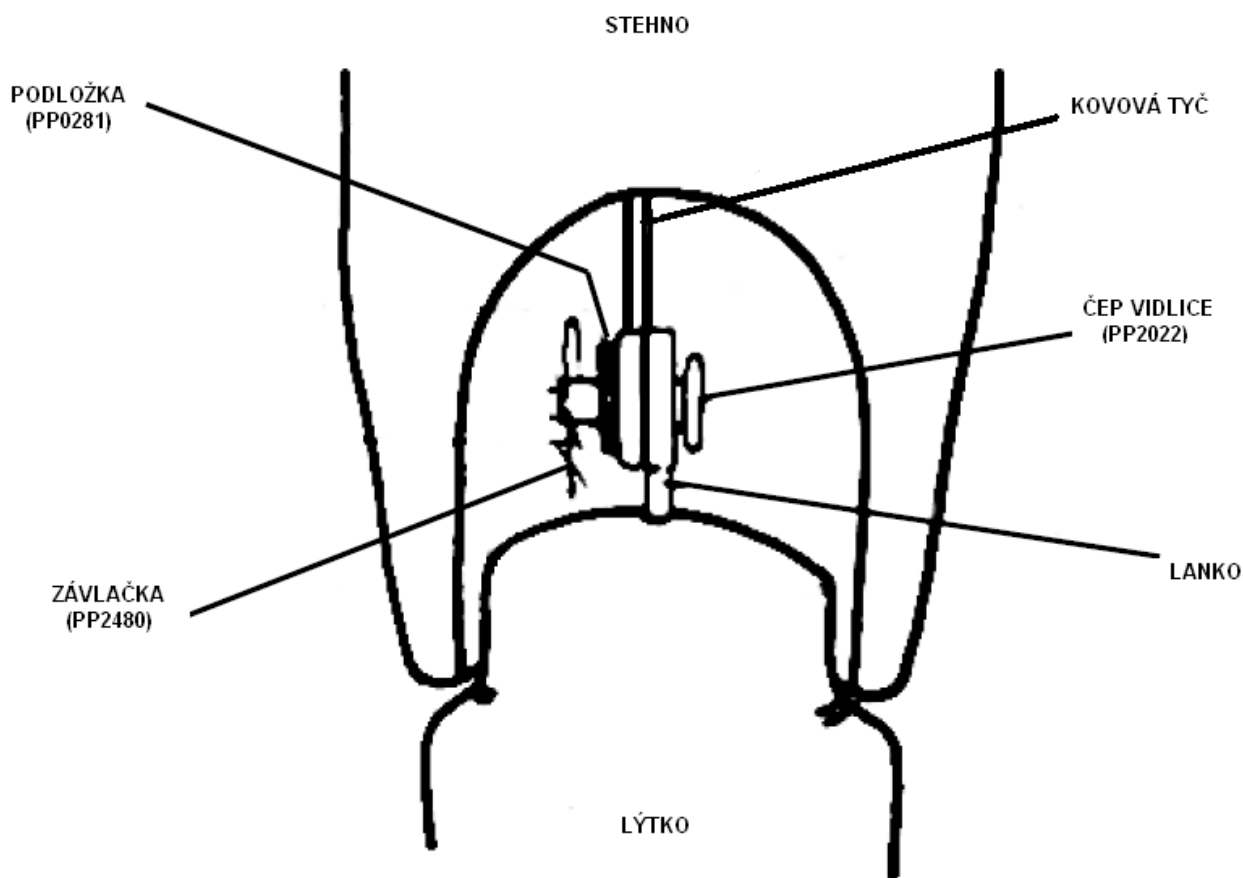

MODELY RESCUE RANDY

Model č. 1338	25 kg
Model č. 1335	48 kg
Model č. 1344	66 kg
Model č. 1345	75 kg
Model č. 1434 Rescue Randy Combat Challenge	66 kg
Model č. 1435 Rescue Randy Combat Challenge	75 kg
Model č. 1475 Rescue Randy IAFF	75 kg

DOPLŇKY

VÁHOVÉ VESTY

Model č. 1112 (malá, střední, velká, extra velká)	9 kg
Model č. 1114 (malá, střední, velká, extra velká)	13 kg
Model č. 1115 (malá, střední, velká, extra velká)	18 kg
Model č. 1118 (malá pro IAFF)	22 kg
Model č. 1120 (střední pro IAFF)	22 kg
Model č. 1125 (velká pro IAFF)	22 kg
Závaží na ramena Model 1000 5,5 kg na každou	11 kg

ÚLOŽNÉ VAKY

Model č. 1373 – vak pro dospělé celotělovou figurínu
Model č. PP2094 – vak pro figurínu Combat Challenge
Model č. 960 – nosítka (53 x 89 cm)