

NÁVOD K POUŽITÍ - OBINADLO KOHEZIVNÍ

yellowBAND	Kohezivní obinadlo 2,5 cm/4,5 m	REF: YCB-2545-x*
yellowBAND	Kohezivní obinadlo 5 cm/4,5 m	REF: YCB-545-x*
yellowBAND	Kohezivní obinadlo 7,5 cm/4,5 m	REF: YCB-7545-x*
yellowBAND	Kohezivní obinadlo 10 cm/4,5 m	REF: YCB-1045-x*
yellowBAND	Kohezivní obinadlo 15 cm/4,5 m	REF: YCB-1545-x*

x* barva

Indikace k použití

- Výrobek je určený k neadhezivní fixaci obvazů, fixaci imobilizačních dlah, vytvoření kompresního obvazu nebo snížení rozsahu pohybu kloubu po úrazu.
- Cílová skupina (cílové skupiny): pacienti vyžadující neadhezivní fixaci obvazu, fixaci imobilizačních dlah, vytvoření kompresního obvazu nebo snížení rozsahu pohybu kloubu po úrazu.
- Není určeno pro uživatele, který nemá odborné znalosti nebo dovednosti v dané oblasti.

Maximální doba používání

- Doba používání by neměla přesáhnout 3 dny.

Příprava před použitím

- Místo aplikace řádně připravte - odmastěte a osušte pokožku (podle postupů platných v daném zdravotnickém zařízení).

Návod k použití

- Rozměr obinadla by měl být vhodně zvolen podle místa aplikace.
- Pokud má být kohezivní obvaz použitý jako podpora primárního krytí, je třeba se řídit pravidly pro krytí ran.
- Vyjměte obvaz z obalu.
- Přiložte obvaz na místo aplikace tak, aby se jednotlivé vrstvy překrývaly a obvaz zůstal na místě, díky kohezivnímu působení.
- Pokud je obvaz příliš dlouhý, nepoužitou část odtrhněte/odstříhněte a nechte ji na roli.
- Volný konec obinadla přitiskněte prsty k předchozím vrstvám obinadla a ujistěte se, že k sobě přilnuly a vytvořily pevné spojení.
- Zkontrolujte, zda obinadlo není příliš utaženo a zda nejsou patrné známky ischemie, jako je bledost nebo modřiny.
- Obinadlo by se mělo měnit podle pokynů pro primární převaz. Pokud se obinadlo nepoužívá k přidržení sterilního obinadla, mělo by být vyměněno, pokud dojde k jeho poškození nebo znečištění, alespoň denně.

Poznámky a upozornění k výrobku

- Jednorázové použití
- Neaplikujte přímo na rány
- Nepoužívejte výrobek po uplynutí data bezpečného použití uvedeného na obalu.
- Nepoužívejte výrobek pokud je poškozený nebo znečištěný
- Pokud se objeví příznaky alergických reakcí, jako je zarudnutí, svědění, vyrážka, je třeba obvaz odstranit a přerušit jeho používání.
- Pokud se objeví příznaky ischemie, kontaktujte zdravotníka (lékaře nebo zdravotní sestru).

Podmínky pro skladování nebo manipulaci

- Doba použitelnosti výrobku je 3 roky od data výroby,
- Skladujte v souladu s podmínkami uvedenými na obalu výrobku.

Likvidace

Obinadlo je jednorázový výrobek a po použití by mělo být zlikvidováno do směsného komunálního odpadu.

Jakýkoli závažný incident týkající se zdravotnického prostředku by měl být nahlášen na
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., ulice Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko; e-mail: incydent@zarys.pl
a

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká Republika
tel.: +420 272 185 794; e-mail: urgent@sukl.cz

vysvětlení symbolů použitých na obalu:

Balení		Hromadné balení	
SYMBOL	NÁZEV SYMBOLU	SYMBOL	NÁZEV SYMBOLU
	Katalogové číslo		Katalogové číslo
	Označení shody CE		Výrobce
	Zdravotnický prostředek		Doba použitelnosti
	Nesterilní		Číslo šarže
	Bez latexu		Bez latexu
	Nepoužívejte opakovaně		Označení shody CE
	Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla		Zdravotnický prostředek
	Chraňte před vlhkostí		Nesterilní
	Teplotní limit		Nepoužívejte opakovaně
	Omezení vlhkosti		Teplotní limit
	Plochý karton		Omezení vlhkosti
	Balící jednotka		Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla
	Přečtěte si návod k použití		Chraňte před vlhkostí
	Doba použitelnosti		Touto stranou nahoru
	Číslo šarže		Vlnitá lepenka
			Limit stohování
			Balící jednotka

			Viz. návod k použití
--	--	---	----------------------