



**LIFEGUARD**<sup>®</sup>  
TACTICAL PRODUCTS



## Nosítka Griffin

REF N7 G2000

CE MD

## 1. Vlastnosti produktu


Skládací nosítka jsou vyrobena z hliníkové slitiny a mají výhody nové konstrukce, díky které jsou lehké a praktické. Nosítka lze po použití složit a uložit, což je vhodné pro přepravu a přenášení.

## 2. Účel použití

Nosítka lze použít v nemocnicích, armádě, na stadionech a dalších místech k transportu zraněných osob.

## 3. Konstrukce

Nosítka se skládá z rukojetí, nožiček, tyče, potahu a fixačních popruhů. Viz obrázek.

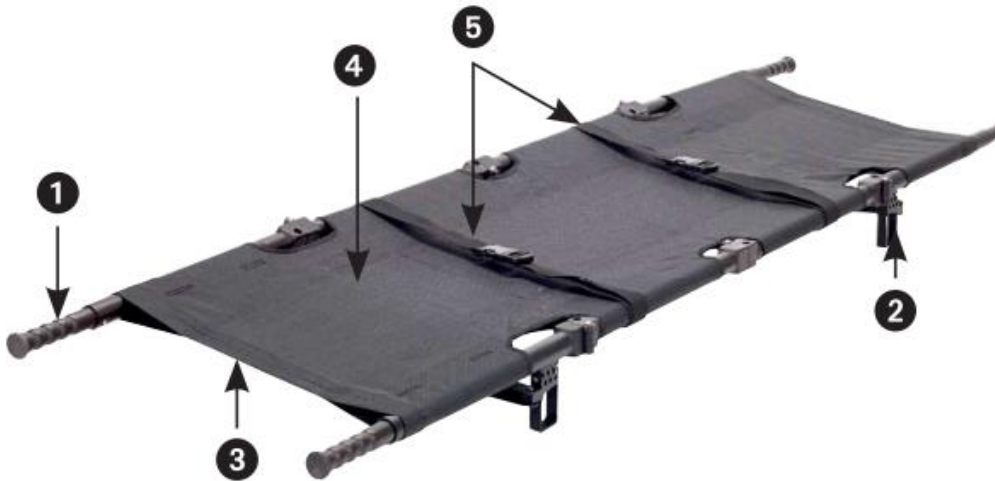

- 1 Rukojetí
- 2 Nohy
- 3 Tyče
- 4 Potah
- 5 Fixační popruhy

## 4. Základní parametry

Rozměr složených nosítek: 550 x 220 x 220 mm

Rozměr rozložených nosítek: 2000 x 520 x 130 mm

Maximální nosnost: 250 kg

## 5. Instrukce

5.1 Tento produkt je připraven k použití.

5.2 Rozestavení výrobku: dvě osoby mohou nosítka podélně roztáhnout. Poté zatlačit příčné vzpěry dovnitř až na doraz. Nosítka lze použít.

5.3 Skládání výrobku: dvě osoby mohou nosítka složit vertikálně dovnitř.

Všechny závažné incidenty související s prostředkem by měly být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient nachází.

## 6. Údržba a dezinfekce

6.1 Použijte čisticí ubrousek nebo měkký kartáček navlhčený do vody a neutrálního čisticího prostředku a poté otřete suchým ubrouskem.

6.2 Dezinfekce neutrálním dezinfekčním sprejem nebo hadříkem. Nesmí se používat jódové a fenolové dezinfekční prostředky.

6.3 Každý týden kontrolujte dotažení šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.

6.4 Každý měsíc doplňte do rotujících částí mazací olej.

## 7. Bezpečnostní opatření

7.1 Aby byla zajištěna pohodlná a bezpečná přeprava pacienta, se doporučuje, aby obsluha nosítek byla proškolená, nevyškolený personál nesmí nosítka obsluhovat!

7.2 Nosítka musí používat nejméně dvě osoby. Při vyprošťování raněných je nutné mít zapnutý fixační popruhy. Je přísně zakázáno používat nosítka hrubě nebo nesprávně, jinak může dojít k jejich poškození!

7.3 Je velmi důležité, aby cvičení probíhalo na nosítkách bez zraněného. Personál bez výše uvedeného školení a praxe nesmějí nosítka používat!

7.4 Tento výrobek je vhodný pouze pro nošení nemocných a raněných. Je přísně zakázáno nakládat nebo přepravovat jiné příliš těžké předměty. Je přísně zakázáno násilně narážet do sanitky nebo jiných předmětů.

7.5 Je zakázáno mytí vysokotlakou vodní pistolí.

7.6 Pravidelně kontrolujte utažení šroubů na všech dílech a doplňte mazací olej do všech pohyblivých dílů.

7.7 Pokud jsou některé části poškozené, kontaktujte naši společnost. Použití jiných, než originálních dílů nese bezpečnostní rizika pro nosítka!

7.8 Poškození součástí nosítek, manipulace a podmínky použití, může mít za následek potenciální bezpečnostní riziko pro nosítka. Nosítka musí být používána tak, aby při převozu raněného/pacienta nebezpečí zranění při pádu přepravované osoby z nosítek.

## 8. Kontraindikace: Žádné.

## 9. Doprava

Během přepravy lze použít obecné přepravní nástroje nebo podle smlouvy o objednávce. Během přepravy je třeba se vyvarovat silných otřesů, slunečního záření a deště. Zabalená skládací nosítka by měla být skladována v dobře větrané místnosti bez korozivního plynu, aby nedošlo k smíchání s toxickými a škodlivými látkami.

## 10. Zákaznický servis

Kontaktní informace a poprodejní servis


Záruční doba tohoto produktu je jeden rok. Záruka se nevztahuje na následující situace:

Poškození nebo poruchy v důsledku nesprávného použití.


Poškození nebo poruchy způsobené nesprávným provozem, údržbou a nedodržením tohoto návodu k použití.

Poškození nebo poruchy způsobené nepředvídatelnými přírodními katastrofami.

Opravy jsou v záruční době prováděny zdarma. Po uplynutí záruční doby je společnost také odpovědná za údržbu / výměnu produktů a účtuje odpovídající poplatky. Společnost neodpovídá za jiné závazky zajištění kvality, než je záruka.

 Jiangyin Everise Medical Equipment Co.,  
Ltd., 1001 Chengyang Road, Jiangyin City, Jianguo, Čína

 Share Info GmbH, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Německo

 servoprax GmbH, Am Marienbusch 9, 46485 Wesel, Německo  
info@servoprax.de, [www.servoprax.de](http://www.servoprax.de)

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.,

Miranova 148/10,

102 00 Praha 10 – Hostivař,

[www.bexamed.cz](http://www.bexamed.cz)

Poslední revize textu: červenec 2022