

Umělý led ICEMIX

Zdravotnický prostředek

Přípravek pro sportovce, zklidňující bolest, zmírňující následky úrazů, výronů kloubů, pohmoždění svalů a podobných zranění.

ÚČEL POUŽITÍ:


Prokázaným přínosem přípravku ICEMIX je zmírnění bolesti pomocí rychlého snížení tělesné teploty v místě poranění. Umožňuje pokračování v dalších sportovních aktivitách a zabráňuje tvorbě hematomů a modřin. Má lokální anestetický účinek využívající působení chladu na tkáň. Ošetření chladem snižuje krvácení do tkáně (modřiny), zabráňuje vzniku otoků a zmírňuje bolest způsobenou těmito následky.

Použitá aromatická kompozice zlepšuje komfort užívání přípravku.

POUŽITÍ:

Před použitím protřepejte. Postříkejte zraněné místo houpavým pohybem ze vzdálenosti 15-20 cm po dobu nejvýše 3-5 sekund, vyhněte se vzniku bílého povlaku. Lze opakovaně použít po 5-10sekundové přestávce, dokud se pokožka neochladí (obrázek 1). Nepoužívejte na sliznice, odřeniny a otevřené rány. Nestříkejte přes materiál nebo oděv.


Nesprávné použití může způsobit omrzliny kůže (obrázek 2)

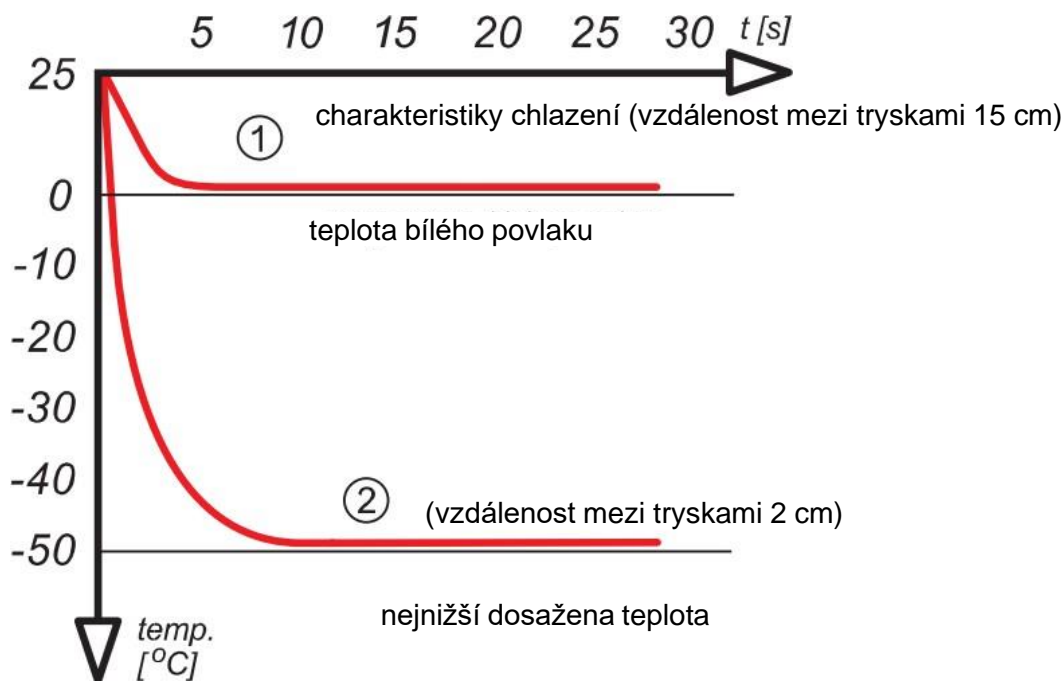

OPATŘENÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji hoření. Skladujte na suchém a dobře větraném místě v prostředí bez agresivních plynů, prachu a par. Při použití nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje hoření. Nepropichujte a nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 F°. Používejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Nevdechujte plyn / mlhu / páry / aerosoly. Zlikvidujte obsah / obal odpadu v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Složení: obsahuje propan, butan a přísady: izopropylalkohol, přírodní esenciální olej z máty, přírodní esenciální olej z eukalyptu.

 **TECWELD Piotr Polak**
ul. Szmaragdowa 21/3/6,
PL / 41-943 Piekary Slaskie

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10,
102 00 Praha 10 – Hostivař,
www.bexamed.cz

Poslední revize textu: červen 2024

 2274

