



Vak pro přežití ve vánici BPS-02



Návod k použití

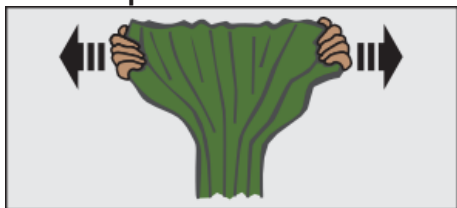

1. Otevřete obal a vyjměte vak. Rozložte vak pro přežití jeho opatrným roztažením do stran.

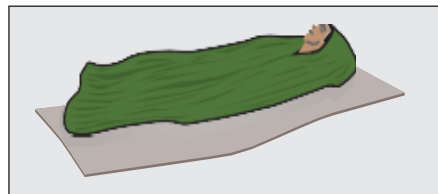

2. Je-li to možné, položte vak na podložku ke zvýšení tepelné izolace (např. na batoh, karimatku, vegetaci).



3. Natáhněte vak kolem hlavy, ale nezakrývejte nos a ústa. Pokud některé oddíly ztratí tvar, zopakujte krok jedna.

Obsah:

1x Vak pro přežití ve vánici.

Zamýšlené použití:

Pro prevenci a léčbu hypotermie.

Profil uživatele:

Výrobky pro přežití ve vánici jsou indikovány pro použití zdravotníky a laiky.

Profil pacienta:

Výrobky pro přežití ve vánici jsou indikovány pro použití u pacientů ohrožených hypotermií nebo vyžadujících léčbu hypotermie.

Klinické přínosy:

K omezení tepelných ztrát pacienta do okolního prostředí, což přispívá k prevenci další újmy na zdraví.

Charakteristiky účinnosti:

Zajistit větruvzdornou a vodovzdornou bariéru vůči prostředí a zároveň poskytnout vyšší tepelnou izolaci.

Prohlášení o výrobku:

Hodnota tepelné izolace přibližně 7 tog.

Kontraindikace:

Vyhledejte přístřešek, nepoužívejte v nebezpečném prostředí, například na skalních převiscích nebo v blízkosti stromů za bouřky. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Při použití po uplynutí doby použitelnosti může dojít ke ztrátě funkčnosti.

Zbytková rizika / varování:

Nebezpečí zadušení, nezakrývejte obličej. Zajistěte monitorování pacienta v pravidelných intervalech. Dojde-li k hypotermii, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podávání zpráv:

Jakékoli závažné události prosím oznamte výrobci (infouk@ps-med.com).



Výrobce a distributor:

Blizzard Protection Systems Limited Unit 2
Coed y Parc Industrial Estate Bethesda, Bangor,
Gwynedd, LL57 4YY, Spojené království
+44 (0)1248 600666 | infouk@ps-med.com |
www.blizzardsurvival.com

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.


Miranova 148/10

102 00 Praha 10 - Hostivař

www.bexamed.cz

Poslední revize textu: únor 2022

Hmotnost. 385g (13.5oz)

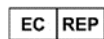

Zplnomocněný zástupce v EU, dovozce:


Comply Express Lda, StartUp Madeira, EV 141
Campus da Penteada, 9020 105 Funchal, Portugal




Vak pro přežití ve vánici BPS-02



Návod k použití

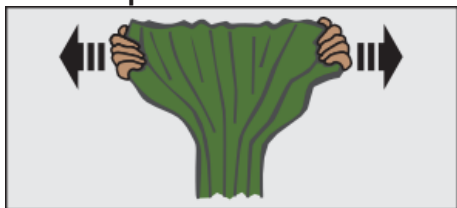

1. Otevřete obal a vyjměte vak. Rozložte vak pro přežití jeho opatrným roztážením do stran.

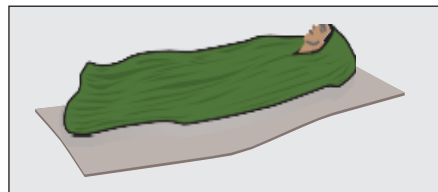

2. Je-li to možné, položte vak na podložku ke zvýšení tepelné izolace (např. na batoh, karimatku, vegetaci).



3. Natáhněte vak kolem hlavy, ale nezakrývejte nos a ústa. Pokud některé oddíly ztratí tvar, zopakujte krok jedna.

Obsah:

1x Vak pro přežití ve vánici.

Zamýšlené použití:

Pro prevenci a léčbu hypotermie.

Profil uživatele:

Výrobky pro přežití ve vánici jsou indikovány pro použití zdravotníky a laiky.

Profil pacienta:

Výrobky pro přežití ve vánici jsou indikovány pro použití u pacientů ohrožených hypotermií nebo vyžadujících léčbu hypotermie.

Klinické přínosy:

K omezení tepelných ztrát pacienta do okolního prostředí, což přispívá k prevenci další újmy na zdraví.

Charakteristiky účinnosti:

Zajistit větruvzdornou a vodovzdornou bariéru vůči prostředí a zároveň poskytnout vyšší tepelnou izolaci.

Prohlášení o výrobku:

Hodnota tepelné izolace přibližně 7 tog.

Kontraindikace:

Vyhledejte přístřešek, nepoužívejte v nebezpečném prostředí, například na skalních převiscích nebo v blízkosti stromů za bouřky. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Při použití po uplynutí doby použitelnosti může dojít ke ztrátě funkčnosti.

Zbytková rizika / varování:

Nebezpečí zadušení, nezakrývejte obličej. Zajistěte monitorování pacienta v pravidelných intervalech. Dojde-li k hypotermii, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podávání zpráv:

Jakékoli závažné události prosím oznamte výrobci (infouk@ps-med.com).

Hmotnost. 385g (13.5oz)

EC REP Zplnomocněný zástupce v EU, dovozce:
Comply Express Lda, StartUp Madeira, EV 141
Campus da Penteada, 9020 105 Funchal, Portugal



Výrobce a distributor:

Blizzard Protection Systems Limited Unit 2
Coed y Parc Industrial Estate Bethesda, Bangor,
Gwynedd, LL57 4YY, Spojené království
+44 (0)1248 600666 | infouk@ps-med.com |
www.blizzardsurvival.com

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.

Miranova 148/10

102 00 Praha 10 - Hostivař

www.bexamed.cz

Poslední revize textu: únor 2022

