

ŠKRTIDLO SOF®

Č. části: **84-0009** | Skladové číslo NATO: **ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ**

US PATENT-8,303,620 a D649,642 a 7 776 064

EC REP

CTC Medical GmbH
Pankstr. 8-10
13127 Berlin, Německo

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.,
Miranova 148/10,
102 00 Praha 10 – Hostivař,
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: leden 2022



POKYNY K POUŽITÍ


Postup použití škrtidla

1



Nasuňte na končetinu

2

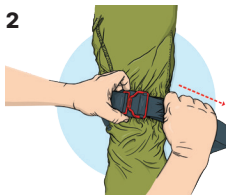

Pevně zatáhněte konec

3



Otočte rukojetí

4



Zajistěte sponku

5



Zajistěte trojúhelníkem

6



Zaznamenejte čas

Postup použití škrtidla, pokud

nelze nasunout na končetinu

Postupujte dle kroků 1b–4b

1b




Zvedněte přezku

2b



Otočením odpojte

3b

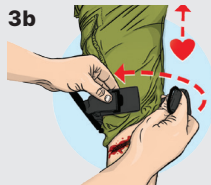

Obmotejte kolem
končetiny

4b



Zapněte přezku, poté
přejděte ke kroku 2

Škrtidlo SOF®

Ke kontrole těžkého krvácení.

Skladování škrtidla SOF®

Škrtidlo skladujte se zapnutou přezkou a dostatečně volně na to, aby bylo možné jeho oko nasunout na končetinu.

CE



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS®, LLC

TELEFONNÍ ČÍSLO 864 224 0081
BEZPLATNÉ ČÍSLO 1.888.822.6331
FAX 864.224.0064
E-MAIL info@tacmedsolutions.com
WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com
1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA

