



# SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling II

**SAM<sup>®</sup>**  
MEDICAL


## STABILIZUJE ZLOMENINY PÁNVE BEZPEČNOU A ÚČINNOU SILOU

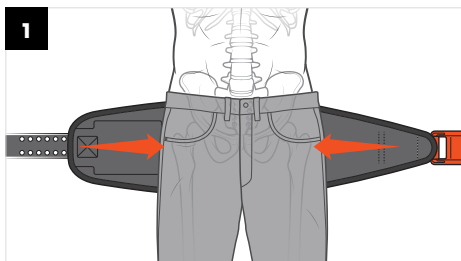

1 Provlékněte celou délku **ČERNÉHO POPRUHU** přeskou.

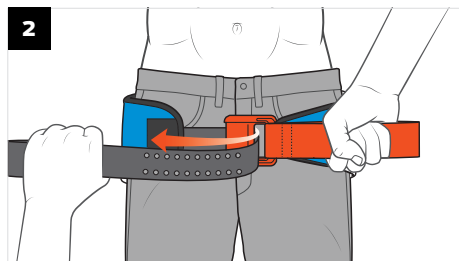

2 Odstraňte předměty z pacientových kapes a pánevní oblasti. Umístěte pánevní pás SAM Pelvic Sling II černou stranou nahoru pod pacienta na úrovni trochanterů (kyčle).

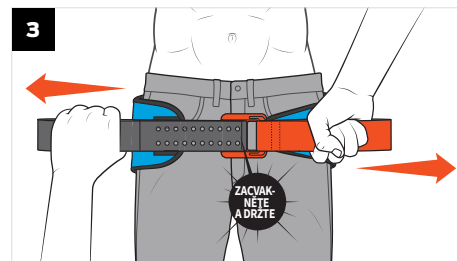

3 Držte **ORANŽOVÝ POPRUH (ZELENÝ POPRUH u PS301-OD-EN)** a táhněte opačným směrem za **ČERNÝ POPRUH**, dokud neuslyšíte a nepocítíte zacvaknutí přezky. Udržujte napnutí a ČERNÝ POPRUH ihned zajistěte přitlačěním na povrch pánevního pásu SAM Pelvic Sling II.

**POZNÁMKA:** Pokud po zajištění pánevního pásu SAM Pelvic Sling II uslyšíte druhé cvaknutí, neznamená to problém. Suchý zip (Velcro<sup>®</sup>) zajišťuje pás na místě při aplikaci správné síly bez ohledu na zapojení přezky.

**ODSTRANĚNÍ:** Zvedněte **ČERNÝ POPRUH** tažením směrem nahoru. Udržujte ho napnutý a nechte pás SAM Pelvic Sling II pomalu uvolnit.

**URČENÉ POUŽITÍ:** SAM Pelvic Sling II je neinvazivní, obvodový pánevní pás určený ke stabilizaci zlomenin pánve pro převoz do zařízení poskytujícího definitivní péči.

**INDIKACE PRO POUŽITÍ:** Pánevní pás SAM Pelvic Sling II je indikován k použití poskytovateli přednemocniční péče, zdravotníky nebo školenými osobami u osob se zlomeninou pánevního kruhu nebo s podezřením na ni, s možným krvácením.

**KONTRAINDIKACE:** Pánevní pás SAM Pelvic Sling nepoužívejte, pokud chybějí anatomické orientační body.

### ⚠ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Před nasazením odstraňte předměty z pacientových kapes a oděvu.
- Během používání sledujte, zda kůže pacienta nevykazuje otlačení.
- Prostředek je pro jedno použití.
- Opakované použití prostředku může způsobit onemocnění (např. infekci) nebo poranění (zhoršená funkce).
- Použitý prostředek zlikvidujte podle předpisů zdravotnického zařízení pro biologicky nebezpečný odpad.

**Poznámka pro uživatele/pacienty v EU:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s tímto prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

REF	PS300-OB-EN		MALÝ Obvod boků 69–114 cm   27–45 palců
REF	PS301-OB-EN		STANDARDNÍ Obvod boků 81–127 cm   32–50 palců
REF	PS302-OB-EN		VELKÝ Obvod boků 91–137 cm   36–54 palců
REF	PS301-OD-EN		STANDARDNÍ Obvod boků 81–127 cm   32–50 palců (NSN: 6515-01-509-6866)

SAM Medical Products<sup>®</sup>  
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200  
Tualatin, OR 97062, USA

**EC REP** **CE**  
Emergo Europe, Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, Nizozemsko

MedEnvoy Global BV  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,  
2595 AM Haag, Nizozemsko

sammedical.com

### **PODMÍNĚNĚ BEZPEČNÝ PRO MR**

Neklinické zkoušky prokázaly, že pánevní pás SAM Pelvic Sling II je podmíněně bezpečný pro MR. Pacient, který má nasazený tento prostředek, může být MR systémem bezpečně snímkován při splnění těchto podmínek:

- Statické magnetické pole 3 T nebo méně.

**Důležitá poznámka:** SAM Pelvic Sling II obsahuje feromagnetické součásti a proto musí být pevně připevněn na těle pacienta podstupujícího MR vyšetření. Pokud jsou feromagnetické součásti při MR vyšetření v zobrazované oblasti, mohou zhoršit kvalitu obrazu. SAM Pelvic Sling II se nesmí v přítomnosti silného magnetického pole, jako je pole vytvářené MR systémem, přemísťovat ani sundávat z těla pacienta.

### **KLINICKÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE:**

Podmínkou bezpečného použití tohoto výrobku je seznámit se s pánevním pásem SAM Pelvic Sling II a návodem k jeho použití, absolvovat školení a dodržovat na důkazech založený standard péče zdravotnické organizace a klinická doporučení včetně používání osobních ochranných prostředků. Pokud tento prostředek není používán v souladu s návodem k použití, školením a klinickými doporučenými postupy, může to mít za následek vážné onemocnění nebo poranění.

#### LEGENDA ZNAČEK:

Výrobce		Nepoužívat opětovně	
Kód dávky	<b>LOT</b>	Označení CE	<b>CE</b>
Podmíněně bezpečný pro MR		Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství	<b>EC REP</b>
Pozor		Čtěte návod k použití. Elektronický návod k použití: sammedical.com/eIFU	
Katalogové číslo	<b>REF</b>	Dovozce	
Zdravotnický prostředek	<b>MD</b>	Jedinečný identifikátor prostředku	<b>UDI</b>
Malý, standardní, velký			

©2023 SAM Medical Products<sup>®</sup> Všechna práva vyhrazena.