



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئىراوطلار تالاحل رەھز جورخو بىئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

### **VLASTNOSTI**

Tašky a batohy GIMA jsou navrženy tak, aby zefektivnily zásahy první pomoci. Zajišťují bezpečnou přepravu a nástroje, léky, přípravky nebo zdravotnické prostředky a prostředky první pomoci jsou uloženy v praktických přihrádkách. Tašky a batohy jsou dodávány prázdné.

### **PRAVIDLA POUŽITÍ**

Výrobek mohou používat pouze kvalifikované osoby, které jsou si vědomy hygienických omezení vyplývajících z použití výrobku v místech, kde by se mohly vyskytovat znečišťující nebo bakteriologicky infikované prvky. Společnost GIMA nenese odpovědnost za škody způsobené na obsahu nebo za škody, které může obsah tašky nebo batohu způsobit.

Výrobek ani žádná z jeho částí nesmí být použita k jiným účelům, než pro které byla určena.

Nenechávejte výrobek bez dozoru, v dosahu dětí nebo nekvalifikovaného personálu.

Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce.

Vyhňte se jakýmkoli provizorním opravám.

Při používání dávejte pozor, abyste nepoškodili zipy.

Při rozepínání a zapínání zipů zkontrolujte, zda se nezasekávají do jiných materiálů, a vždy je zcela rozepněte nebo zapněte.

Pokud by z lahví vytekly nějaké tekutiny nebo prášky, tašku nebo batoh vyčistěte a vydezinfikujte, protože by mohly poškodit nebo kontaminovat samotnou tašku nebo výrobky uvnitř.



Příliš nepřepínajte. Hmotnosť a tvar obsahu musí odpovedať typu tašky alebo batohu. Vždy zkontrolujte, zda hmotnosť obsahu nepřesahuje údaje o hmotnosti modelu tašky nebo možnosti uživatele. Případné údaje o maximální hmotnosti, kterou lze zvedat a přemísťovat ručně, naleznete v místních platných předpisech.

### **ROZBALENÍ**



Prvky obalu (papír, celofán, kovové sponky, lepicí páska atd.) mohou při neopatrném zacházení pořezat a/ nebo poranit. Odstraňte je pomocí vhodných nástrojů a nenechávejte je u nepovolaných osob. Totéž platí pro nástroje používané k otevírání obalů (nůžky, nože atd.).

Po otevření obalu je třeba nejprve zkontrolovat všechny části výrobku; ověřit, zda jsou všechny potřebné součásti na svém místě, a ověřit jejich stav: pohyb zipů, upevnění spon, suchých zipů nebo pásků, odolnost rukojetí.

### **ÚDRŽBA**

Vyprázdněte všechny kapsy a vytřepajte všechny volné nečistoty. poté použijte jemný prací prostředek a vodu na vyčištění skvrn nebo znečištěných míst. Pro důkladnější čištění můžete celou tašku vyprat v ruce jemným pracím prostředkem a teplou vodou. Tkaninu jemně vydrhněte měkkým kartáčem nebo hadříkem a poté ji důkladně opláchněte. Nakonec tašku pověste, aby uschla na vzduchu. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo bělidla, protože by mohla poškodit polyesterovou tkaninu.

Tašky a batohy nelze vkládat do autoklávu.

Dodržujte zákony země, ve které výrobek používáte, a správně jej zlikvidujte.

### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA**

Platná standardní 12měsíční záruka B2B společnosti Gima

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.

Miranova 148/10,

102 00 Praha 10 – Hostivař,

[www.bexamed.cz](http://www.bexamed.cz)

Poslední revize textu: srpen 2025